

TROFOLASTIN[®]

REDUCTOR DE CICATRICES

#pielsinrecuerdos

Reduce de forma visible
las cicatrices hipertróficas
y queloides en 8 semanas.

#pielsinrecuerdos

Reductor de cicatrices

Apósitos Reductor de cicatrices: 4 x 30 cm

Apósitos Reductor de cicatrices: 5 x 7,5 cm

Apósitos Reductor de cicatrices: 10 x 14 cm

Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su fijación a la piel.

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones

1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides.

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides.

Una cicatriz es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está totalmente curada.

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un resultado mejor (véase "Precauciones y contraindicaciones").

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas.

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas.

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase "Precauciones y contraindicaciones").

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemaduras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación solar.

#pielsinrecuerdos

Precauciones y contraindicaciones

- #Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y consultar a un médico o profesional sanitario.
- #No utilizar en quemaduras de tercer grado.
- #No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de sutura o grapas.
- #No utilizar si el envase está abierto o dañado.
- #No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
- #No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
- #No utilizar en recién nacidos.
- #No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
- #De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el riesgo de contaminación e infección.
- #En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
- #Sólo para uso externo.
- #Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse alejado de niños y animales.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)

Instrucciones de uso:



1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.



2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.



3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.



4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se separe de la piel.



#pielsinrecuerdos

Reductor de cicatrices mamario

Apósitos Reductor de cicatrices: 6,5 x 6,5 cm

Apósitos Reductor de cicatrices: 2 x 22 cm

Apósitos Reductor de cicatrices: 2 x 7,5 cm

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o modelado de senos (mastopexia). Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T invertida" debidas a cirugía plástica o reconstructiva.

Instrucciones de uso:



1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario.



2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.



3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submamaria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.



4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.

#pielsinrecuerdos



5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamas.

6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se separe de la piel.

Reductor de cicatrices periareolar

Apósitos Reductor
de cicatrices: 6,5 x 6,5 cm

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como mamoplastias de aumento.

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares.

Instrucciones de uso:



1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar.

2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.

#pielsinrecuerdos



3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a desprejarse, sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.



4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe de la piel.

Presentaciones

Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:

- # 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
- # 5 apósitos de 5 X 7,5 cm C.N. 379354.4
- # 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:

- # Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
- # Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2

Otros productos

Antiestriás: **Trofolastín antiestriás.**

Cuidado y protección de la piel del pezón: **Trofolastín Cuidado del Pezón.**

Reafirmante corporal: **Trofolastín Reafirmante Postparto.**

Prevención de estriás, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los senos: **Trofolastín Senos.**

Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: **Trofolastín Reductor de Cicatrices.**

Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: **Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar.**

Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: **Angiogel.**

TROFOLASTIN[®]

#piel sin recuerdos



Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial Estate,
Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.



Advanced Medical Solutions B.V.,
Munnikenheiweg 35,
4879 NE Etten-Leur, Netherlands.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.
Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España



Límite superior de temperatura



Número de catálogo



No reutilizar



Fecha de caducidad



Precaución, consúltense los
documentos adjuntos.



Nº de lote



Leer las instrucciones de uso



Representante autorizado
en la Unión Europea.

